

Клиническое сведение хирурга и персонала операционной Инструкция по применению Маркировка: Информация о нити								
REF	АРТИКУЛ. НОМЕР ПРОДУКТА ПО КАТАЛОГУ		НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН		ИГЛА СС (СИСИ)	НЕОКРАШЕННЫЙ, РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ, МОНОФИЛАМЕНТНЫЙ МАТЕРИАЛ
SN	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР, ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР		НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО		ДИАПАЗОН ВЛАЖНОСТИ		КОЛЮЧЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА ТАРЕРСИТ (ТАПЕРКРЫТ)	НЕОКРАШЕННЫЙ, НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ, ПЛЕТЕНЫЙ МАТЕРИАЛ С ПОКРЫТИЕМ
LOT	НОМЕР ПАРТИИ		НЕ СТЕРИЛЬНО		ОГРАНИЧЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ		ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА	НЕОКРАШЕННЫЙ, РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ, ПЛЕТЕНЫЙ МАТЕРИАЛ С ПОКРЫТИЕМ
STERILE R	СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ: РАДИАЦИИ		ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ГОДА И МЕСЯЦА, УКАЗАННЫХ НА УПАКОВКЕ		НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ БАРЬЕРА ПЕРВЫХ ИЛИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ		ОСТОРОЖНО! ОБРАТИТЬСЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ОКРАШЕННЫЙ, РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ, ПЛЕТЕНЫЙ МАТЕРИАЛ С ПОКРЫТИЕМ
STERILE EO	СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ: ОКИСИ ЭТИЛЕНА		БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ, ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ		ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ ПРИ ДЕКЛАРИРОВАНИИ СООТВЕТСТВИЯ		ШПАЛЬЕВАЯ ИГЛА	НЕОКРАШЕННЫЙ, НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ, ПЛЕТЕНЫЙ МАТЕРИАЛ С ПОКРЫТИЕМ
STERILE I	СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПАРОМ ИЛИ СУХИМ ЖАРОМ		НЕ ДОПУСКАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЧЕНОГО СВЕТА, ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА		БИОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК		РЕЖУЩАЯ ИГЛА	НЕОКРАШЕННЫЙ, НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ, ПЛЕТЕНЫЙ МАТЕРИАЛ С ПОКРЫТИЕМ
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ		ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ		ХРУПКОЕ, ОБРАЩАТЬСЯ ОСТОРОЖНО		РЕЖУЩАЯ ИГЛА PRIME (ПРАЙМ)	ОКРАШЕННЫЙ, НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ, КРУЧЕНЫЙ МАТЕРИАЛ С ПОКРЫТИЕМ
	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА		НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ТЕМПЕРАТУРНОГО ДИАПАЗОНА		КОЛЮЧАЯ ИГЛА ТАРЕР ПОИНТ (ТАПЕРПОИНТ)		ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА PRIME (ПРАЙМ)	НЕОКРАШЕННЫЙ, РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ, ПЛЕТЕНЫЙ МАТЕРИАЛ С ПОКРЫТИЕМ
	RUS.LAB - 0.0.1.2.8.5.9@0.0.1		ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ТЕМПЕРАТУРНОГО ДИАПАЗОНА		МОДИФИЦИРОВАННАЯ КОЛЮЧАЯ ИГЛА ТАРЕР ПОИНТ ПЛЮС (ТАПЕРПОИНТ ПЛЮС)		КОЛЮЧАЯ ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА ETHIGUARD (ЭТИГАРД)	ЛЕГКО ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ УПАКОВКА

ОКРАШЕННЫЙ МАТЕРИАЛ		НЕОКРАШЕННЫЙ МАТЕРИАЛ							
Частный вес вентиляции	Грибовидный % сопротивления перфорации	Частный вес после извлечения	Грибовидный % сопротивления перфорации						
7дни	0%	7дни	5%						
14дни	10%	14дни	20%						
Временная прочность на разрыв при температуре установки не менее 28 дней при температуре 37°C	Временная прочность на разрыв при температуре установки не менее 28 дней при температуре 37°C								
Применение может различаться в зависимости от терапии и/или индикатора.									
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ		Поскольку данный шовный материал (окрашенный и неокрашенный) является рассасывающимся, он не должен использоваться в случаях, когда необходимо длительное соединение тканей под действием нагрузок.		Материал. Избегайте повреждений в результате сдавливания и деформации при процедурами и техники применения рассасывающегося шовного материала перед использованием нитей МОНОКРИЛ (MONOCRYL) для ушивания ран, так как риск расхождения краев ран зависит от места применения и типа используемого шовного материала. При выборе шовного материала хирург должен учитывать характеристики материала <i>in vivo</i> (согласно разделу «ДЕЙСТВИЕ»). Данный шовный материал может не подходить пожилым, истощенным и ослабленным пациентам, а также пациентам с заболеваниями, при которых наблюдается замедленное заживление ран. Длительный контакт шовного материала, как и любого инородного тела, с растворами солей, например, присутствующих в моче- и желчевыводящих путях, может приводить к образованию камней. Рассасывающиеся нити МОНОКРИЛ (MONOCRYL) может временно выступать в качестве инородного тела.		ПОДОБНЫЕ РЕАКЦИИ		Срок годности изделия указан на упаковке продукта и составляет 66 месяцев. Не использовать после истечения срока годности.	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ/МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ		Надежность и эффективность использования нитей МОНОКРИЛ (MONOCRYL) не были установлены при использовании с нервной тканью, сердечно-сосудистой тканью, а также		Неблагоприятные реакции, связанные с использованием данного материала, включают временное локальное раздражение в месте раны, временную воспалительную реакцию на инородное тело, эритему и индурацию в процессе рассасывания подложного шовного материала. Как и любое другое инородное тело, нити МОНОКРИЛ (MONOCRYL) может усиливать уже имеющуюся инфекцию.		ГАРАНТИЯ		Производитель гарантирует конечному потребителю отсутствие дефектов и соответствие характеристик продукта на протяжении всего срока годности продукта при условии СОБЛЮДЕНИЯ требований условий хранения, транспортировки и целостности упаковки.	
При лечении загрязненных и инфицированных ран следует придерживаться общепринятой хирургической практики.		При лечении загрязненных и инфицированных ран следует придерживаться общепринятой хирургической практики.		Изменение формы иглы может вызвать		Инструкция по использованию		прикрепленными иглами из неркашющей стали различных типов и размеров. Иглы могут быть с постоянно закрепленной нитью или типа CONTROL RELEASE™ (контролируемое освобождение), что позволяет освобождать иглу от нити, не отрезая последнюю. Подробное описание ассортимента продукции приводится в каталоге.	
				Инструкция по использованию		Нити хирургические стерильные, синтетические, рассасывающиеся, с атравматическими иглами и без игл: МОНОКРИЛ (MONOCRYL).		СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	
				Нити МОНОКРИЛ (MONOCRYL) является стерильным синтетическим рассасывающимся моноволоконным швом материалом, изготовленным из сополимера гликолида и ϵ -капролактона. Эмпирическая молекулярная формула полимера – (C ₆ H ₁₀ O ₂) _n (C6H10O2)n. Установлено, что сополимер полиглекапр-25 лишен антигенных и пирогенных свойств и в процессе рассасывания вызывает лишь легкую тканевую реакцию.		ОПИСАНИЕ		Нити МОНОКРИЛ (MONOCRYL) соответствует требованиям Европейской фармацевтической конференции к «стерильному синтетическому рассасывающемуся моноволоконному швовому материалу», и требованиям Фармацевтической Ассоциации США, предъявляемым к «рассасывающемуся хирургическому швовому материалу», кроме незначительного превышения по диаметру.	
				Условия применения		Нити МОНОКРИЛ (MONOCRYL) предназначены для профессионального использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях.		УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	
				Нити МОНОКРИЛ (MONOCRYL) производят благодаря гидролизу, когда полимер в конечном счете разрушается до ацетиновой кислоты, которая затем метаболизируется в организме. Рассасывание начинается с потери прочности на разрыв, за которой следует потеря массы. Исследования с имплантацией крыс показали следующее:		ПОКАЗАНИЯ		Нити МОНОКРИЛ (MONOCRYL) предназначены для общего использования при	